

機械器具 01 手術台及び治療台
一般的名称 汎用手動式手術台 36867010

特定保守管理医療機器


スクープストレッチャー

【禁忌・禁止】

1. 本品を改造・分解しないこと
2. 担架と患者の合計重量が耐荷重を上回らないよう注意すること

【形状・構造及び原理】

1. 外観図

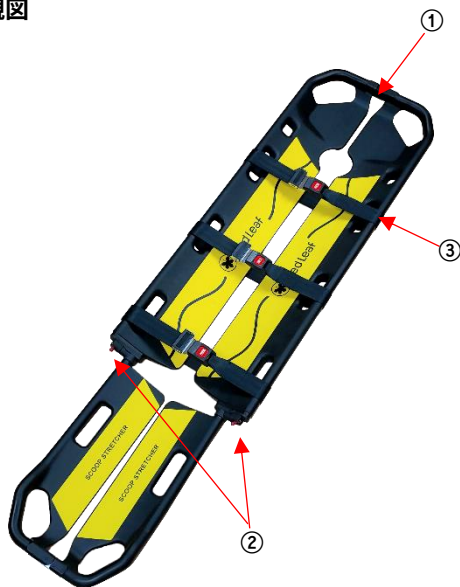

- ① 分離ボタン
ストレッチャーを左右方向へ分離するとき使用するボタン。頭方向と脚方向各1本ずつあり完全に分離できる。
- ② 長さ調節ロック装置
ロックを解除すると、ストレッチャーの長さが調整できる。
- ③ ボディ固定ベルト
患者の身体を固定する装置でシートベルトの形になっており、患者の身体に合わせて長さを調整し、バックルを結合して固定を完了する。

2. 寸法

	展開時	収納時
全長 (cm)	164	117
幅 (cm)	42	42
高さ (cm)	7	10
重量 (kg)	5.4	5.4
最大荷重 (kg)	200	-

【原材料】

部位	材質
バー	金属
フレーム	ポリマー

【使用目的又は効果】

本品は、手術が必要な部位の大部分に適応するように改良された完全移動型手術台（汎用）であり、治療台兼用移送車（救急処置台ストレッチャー）として使用することを目的とする。

【使用方法】

分離型ストレッチャーの使用方法を熟知してから使用すること。

1. 患者の怪我を正確に把握する。
2. 長さ調整ロックを緩めて製品の長さを患者に適宜調整した後、ロック装置を固定する。
3. 製品の頭部と脚部の分離ボタンを押して、製品を左右に完全に外す。
4. 製品を患者の体の下にスライドさせてから、リリースボタンを元に戻す。
5. 患者を製品の中央に平らに置く。
6. 身体固定ベルトを使用して、患者を安全に固定する。
7. 製品の両端を持ち上げて、患者を移送する。

【使用上の注意】

1. 血液、体液等で汚損の場合は、廃棄すること。
2. 本体に悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

破損がある場合は、使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区一丁目14番地20
光正第2ビル301
株式会社オーストリッチインターナショナル
電話：045-470-9041（代）
FAX：045-470-9043

製造業者

SHANGHAI EMSS MED&TECH CO., LTD (中華人民共和国)